


GYKO PRO

Quick Installation Guide

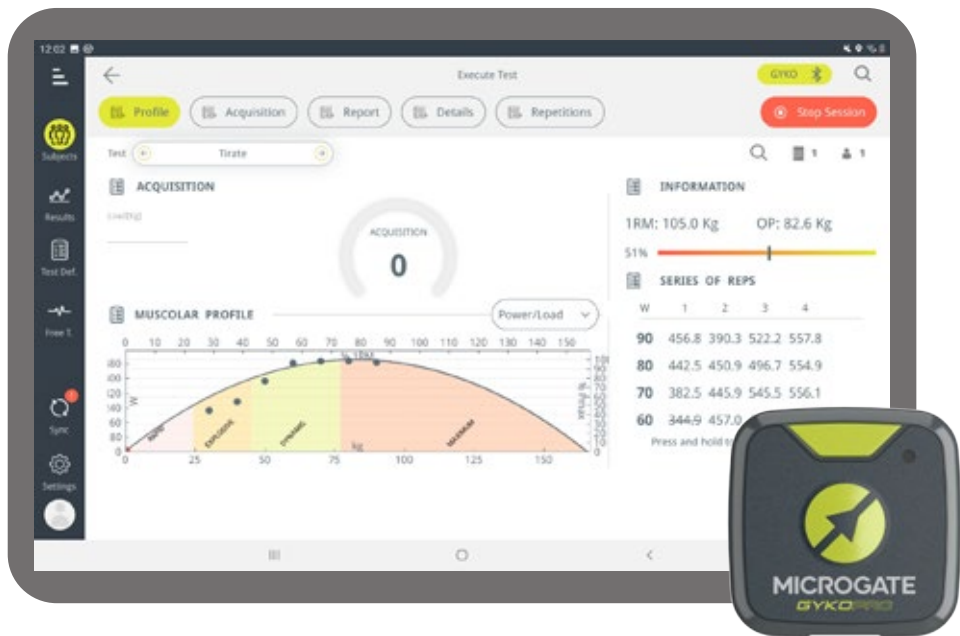


ProMove ist für Tablets und Smartphones verfügbar

Sehen Sie sich hier die Tutorials an:
<https://tutorials.microgate.it/>

Nutzung mit der ProMove APP

Um die APP nutzen zu können, muss ein Konto erstellt werden: Nach der Registrierung wird eine Bestätigungs-E-Mail an die registrierte Adresse gesendet. Wenn Sie einen Gutschein erhalten haben, können Sie ihn direkt über das Internet aktivieren (<https://www.pro-move.it/>) - andernfalls können Sie den für Sie passenden Abonnementplan wählen.

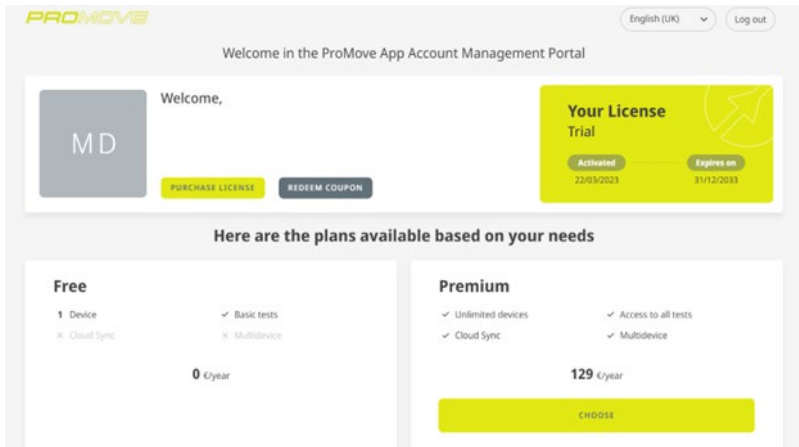



Schritt 1:

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät, sowie WiFi und GPS.


Starten Sie die ProMove APP.

In der Zwischenzeit können Sie den GykoPro einschalten, indem Sie die mittlere Taste drücken. Das grüne Licht bestätigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.

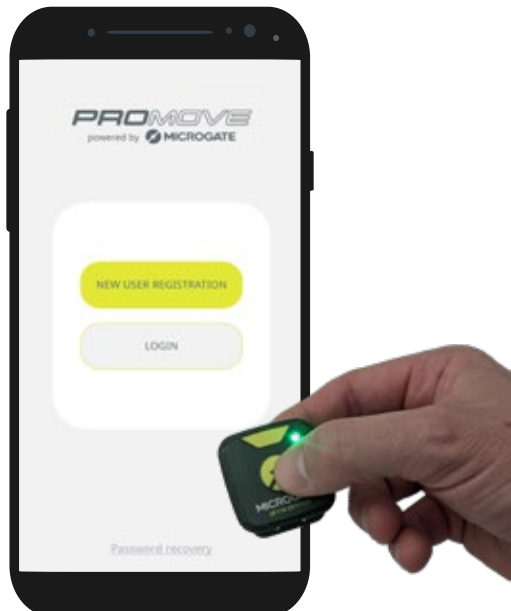

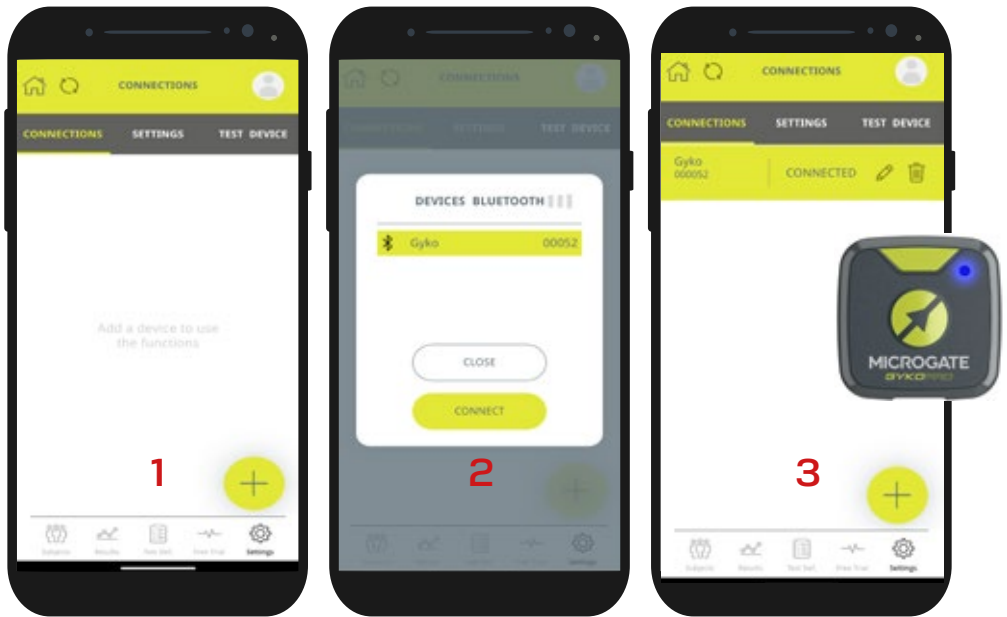



Schritt 2:

1. Klicken Sie auf Einstellungen und suchen sie ein neues Gerät mit 
2. Das Gerät wird aufgelistet - um es zu aktivieren, wählen Sie es aus
3. Wenn eine Verbindung besteht, wird die Zeile auf der APP grün gefärbt und das Licht auf dem Gerät beginnt blau zu blinken.


Schritt 3:

Nachdem ein Test definiert (Menüpunkt Testdefinitionen ) und mindestens eine Testperson eingegeben wurde (Menüpunkt Testpersonen ), kann das Gerät verwendet werden.

Wenn Sie das nächste Mal auf die APP zugreifen, verbindet sich der GykoPro automatisch

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt.

Hinweis: Nach einigen Sekunden der Inaktivität geht das Gerät in den automatischen Ruhezustand über und die LED erlischt, um eine längere Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

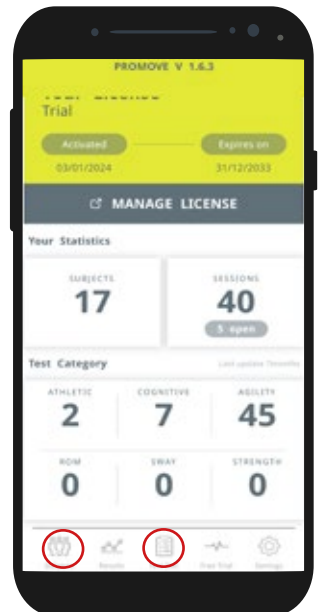

Verwendung in Kombination mit den Systemen OptoJumpNext oder OptoGait


Vergewissern Sie sich, dass Sie die Software OptoGait/OptoJumpNext auf Ihrem PC installiert und auf die neueste Version aktualisiert haben. Die neueste Version unserer Software ist verfügbar unter: <https://medical.microgate.it>

Schritt 1:

Schalten Sie den GykoPro ein, indem Sie die mittlere Taste gedrückt halten

Schritt 2:

1. Starten Sie die Software, indem Sie auf das OptoGait/OptoJumpNext-Symbol auf Ihrem Desktop klicken.
2. Klicken Sie auf das Menü Einstellungen > Geräte
3. Klicken Sie auf „Neue Suche“ in der unteren rechten Ecke
4. Wählen Sie das GykoPro-Gerät aus der Liste aus
5. Drücken Sie dann auf „Aktivieren“

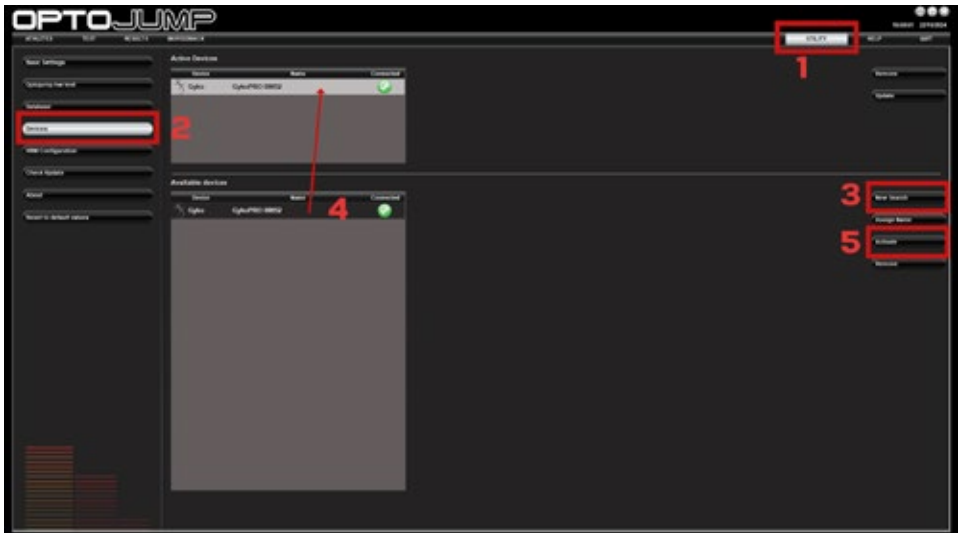

Sie können den GykoPro Trägheitssensor jetzt mit OptoGait und/oder OptoJumpNext verwenden.

Schauen Sie sich auch unseren
interaktive quick start guide an

